

SEKUSEPT® AKTIV

Aktiivhapnikul ja peräädikhappel põhinev kõrgekvaliteediline tugevalt puhastava - ja desinfitseeriva toimega vahend kõikidele meditsiinilistele instrumentidele.

Sobib termolabiilsetele ja termostabiilsetele instrumentidele, sh. painduvate endoskoopide manuaalseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

Sekusept® Aktiv on väga hea materjalisobivusega.

Endoskoopide ja instrumentide töötlemine:

Töölahuse valmistamine

Lahuse valmistamiseks kasuta kaasasolevat mõõtelusikat/topsikut. Lahusta vajalik kogus pulbrit. Sega lahust mõned korrad 15 minuti jooksul. Peale 15 minuti möödumist on lahus kasutusvalmis.



Doseerimine

Kasuta lahuse valmistamiseks pulbriga kaasas olevat mõõtetopsi (30 ml = 20 g)

2% lahus 20 g / 1 l

1 % lahus 20 g / 2 l

Käsitsi töötlemine

Aseta instrumendid lahusesse kohe peale kasutamist. Vaata, et kõik instrumendid oleksid täielikult lahusega kaetud. Lahuses ei tohi olla mullikesi. Võta instrumendid lahusest peale määratud toimeaega ning loputa puhta ja kvaliteetse veega, mis on vähemalt joogivee kvaliteediga. Ideaalis destilleeritud või demineraliseeritud veega.

Puhastamine ultrahelivannis

Sekusept Aktiv sobib kõikidele roostevabast terasest ultrahelivannidele. Tõhusaks desinfitseerimiseks peab järgima instrumentide tootjate poolt antud juhiseid. Desinfiseerimiseks mõeldud toimeajast tuleb kinni pidada.

Töölahuse peab iga päev uue valmistama!

Väga määrduvad lahuse efektiivsuse kontrolliks soovitame kasutada Sekusept Aktive testribasid.

Mikrobioloogilised kontroll-tulemused:

	Konsentratsiooni (%)	Toimeaeg
Instrumentide desinfektsioon vastavalt VAH (DGHM), Puhas/must; bakteritsiidne / fungitsiidne, EN13727, EN13624 (fungi), EN14561, EN14562	1,0 2,0	60 min 5 min
Instrumentide desinfektsioon vastavalt VAH, sh.TB Puhas /must; tuberkulotsiidne, EN14348, EN14563	1,0 2,0	60 min 5 min
RKI nimekirja kohaselt – toimespekter A	2,0	60 min
Virutsiidne vastavalt EN14476	1,0 2,0	60 min 10 min
Bacillus subtilis (sporitsiidne) vastavalt EN13704	2,0	15 min
Clostridium difficile	2,0	15 min

SEKUSEPT AKTIV pakend

1,5 kg ämber

6 kg ämber