

## SEKUSEPT® PULBER

### **AKTIIVSEL HAPNIKUL PÕHINEV PULBRILINE KONTSENTRAAT MEDITSIINILISTE INSTRUMENTIDE NING PINDADE PUHASTAMISEKS JA DESINFEKTSIOONIKS.**

**SEKUSEPT® PULBER** põhineb aktiivsel hapnikul, mis vabaneb pidevalt spetsiaalselt biolagundava aktivaatori kaudu. Puhastab aktiivselt, lahustab mäda, vere, röga ja sekreedid.

**SEKUSEPT® PULBER** on sertifitseeritud DGHM ( Saksamaa Hügieeni- ja Mikrobioloogia Ühing ) poolt.

**SEKUSEPT® PULBER** 2% töölahus sisaldab > 600 mg/L (ppm) peräädikhapet. Peräädikhape moodustub lahuse valmistamise käigus.

**SEKUSEPT® PULBER** sobib kasutamiseks väga paljudel materjalidel (metall, plastik, elastomeer, klaas jne.) ning kõikidel instrumentidel, mis on valmistatud ka kroomterasest. Sobib ka pestavate pindade, nagu inkubaatorite ja vannide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Sobib kasutamiseks ka ultrahelivannis.

**SEKUSEPT® PULBER** sobib ka pindade desinfektsiooniks. Eriti sobilik inkubaatorite ning vannide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Sobib ka proteeside (hambaravis) desinfitseerimiseks.

**SEKUSEPT® PULBER ei sobi** kasutamiseks painduvatel endoskoopidel ning instrumentidel, mis on valmistatud alumiiniumist või on nikeldatud pinnaga.

**Iga päev tuleb valmistada uus töölahus.**

**Toimespekter:** Bakteritsiidne (koos aktivaatoriga ka. Tbc), fungitsiidne, kaetud ning katmata viiruste vastane toime (virutsiidne).

#### **Kasutamine:**

Kaasoleva mõõtelusika abil lisatakse veele (20° C) pulber, arvestusega 20g pulbrit / 1 L vett (saame 2% lahuse). Segage korralikult! Peale 15 minutit on lahus kasutusvalmis. Seejärel lisatakse vajalik aktivaatori kogus ning see sõltub töölahuse kogusest.

Esmalt tuleb alati valmistada töölahus ja seejärel asetada instrumendid lahusesse, et vältida õhumullide teket.

Asetage instrumendid kohe peale kasutamist lahusesse. Veenduge, et instrumendid on lahusega täielikult kaetud. Pärast toimeaja möödumist võtke esemed lahusest ning loputage hoolikalt joogiveega (ideaalis destilleeritud või demineraliseeritud veega) temperatuuril < 30° C.

Pindade puhastamiseks pühkige pinnad vahendiga üle ning laske kuivada.



## Mikrobioloogilised ja virooloogilised testitulemused

		Kontsentratsioon (%)	Toimeaeg
Bakteritsiidne EN 13727; EN 14561		1% + 1% A* 1,5% + 1,5% A* 2% + 2% A* 3% 1,5%	60 min. 30 min. 15 min. 15 min 1 h
Fungitsiidne EN 13624; EN 14562		1% + 1% A* 1,5% + 1,5% A* 2% + 2% A* 3% 1,5%	60 min. 30 min. 15 min. 15 min 1 h
Tuberkulotsiidne EN 14563; EN 14348		1% + 1% A* 1,5% + 1,5% A* 2% + 2% A*	60 min. 30 min. 15 min.
Virutsiidne EN 14476		2% + 2% A*	30 min.
Adeno		2% + 2% A 2%	5 min. 15 min.
Rota		2% + 2% A* 1%	5 min. 1 h
Polio		2% + 2% A* 2%	30 min. 2 h
Papova		2%	5 min.
Pinnadesinfektsioon vastavalt VAH, mehhaanilisel teel (bakteritsiidne, fungitsiidne)	Puhas pind	1,0% 0,5%	1 h 4 h
	Must pind	1,5% 1,0%	1 h 4 h
Virutsiidne (sh. HBV, HCV, HIV) – vastavalt 01/2004 RKI soovitustele		2%	15 min.
Sporitsiidne		2% + 2% A*	6 h

\* aktivaator Sekusept pulbri juurde

**SEKUSEPT® PULBER pakendid:**

2 kg ämber + mõõtelusikas

10 kg ämber + mõõtetops