

Kinnitas:	<i>elektrooniliselt</i>	Agnes Ivanov	Vanemlaborispetsialist	04.07.2024
Koostas:	<i>elektrooniliselt</i>	Pille Mee	Juhtiv bioanalüütik	04.07.2024
	Allkiri	Ees- ja perekonnanimi	Ametikoht	Kuupäev

MiniCollect® Safety ja MiniCollect® Lancelino Safety Greiner Bio-One lantseti kasutusjuhend

1. Eesmärk

Juhendi eesmärk on tagada eesmärgipärane MiniCollect® Safety ja MiniCollect® Lancelino Safety lantsettide kasutamine. Kapillaarvere võtmisel lastelt järgi juhendit: Vastsündinutelt, imikutelt ja lastelt kapillaarvere võtmine [JKL-228](#).

2. Vastutus

Kapillaarvere võtmise protseduuri eest vastutavad bioanalüütikud/laborandid. Patsiendilähedaste uuringute teostamise eest vastutavad õed ja ämmaemandid.



3. Kehtivus

Protseduur kehtib SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinikutes ja meditsiinilistes teenistustes.





4. Protseduur



Kapillaarvere võtmisel MiniCollect® Safety ja MiniCollect® Lancelino Safety lantsetiga lähtu õige suurusega lantseti valimisel lapse vanusest ja kaalust vt tabel 1. Lantseti kasutusjuhend on ära toodud joonisel 1 ja ühendlaboris kasutusel olevad mikrokatsutid leiad tabelist 2.

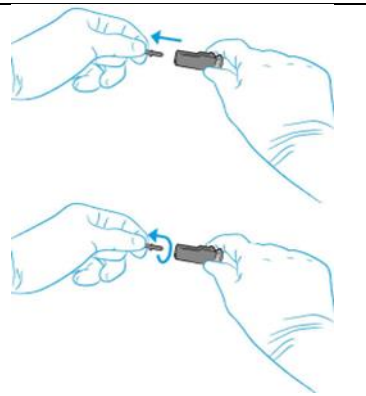
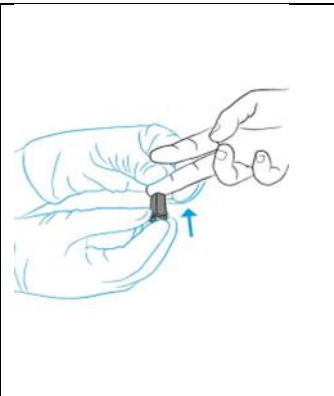




Tabel 1. Verevõtu lantsetid

Toote nimetus ja ref. number	Nõela suurus	Torkesügavus	Lapse vanus	Lapse kaal	
MiniCollect® Lancelino Safety 450522		21 G	1,8 mm	6 kuud kuni 8 aastat	> 10 kg
MiniCollect® Safety 450429			2,00 mm	> 8 aasta	

Tabel 2. Mikrokatsutid

Toote nimetus ja ref. number	Toote nimetus ja ref. number		
Microvette® APT 250 EDTA K2E 20.1331.100		Microvette® APT 500 EDTA K2E 20.1330.100	
MiniCollect® TUBE 0.25 ml FX Sodium Fluoride / Potassium Oxalate 450540		Microvette® 200 Fluoride/heparin FH 20.1289	

MiniCollect® TUBE 0.5/0.8 ml CAT Serum Sep Clot Activator 450533		Microvette® 200 Serum Gel CAT 20.1291	
--	---	--	--

1. Vii läbi käte ja torkekoha antiseptika. Pärast torkekoha puhastamist lase antiseptilisel vahendil õhu käes kuivada.			
			
2. Hoia lantsetti sõrmede vahel ja eemalda kaitsekapp olenevalt lantsetist, kas tõmmates või keerates.	3. Hoia torkekohta kindlalt kinni, et vältida äkilist liikumist. Aseta lantsett torkekohale ja seejärel vajuta õrnalt nuppu lantseti ülasaosas. NB! Ära avalda tugevat survet punktsioonikohale!	4. Kohe pärast torget eemalda lantsett ja viska see sobivasse ohtlike jäätmete konteinerisse	5. Pühi esimene veretilk ära ja sõrmele õrnalt survet avaldades kogu proovimaterjal.
			
Keera	Tõmba		

Joonis 1

Lantsetid on ühekordsed, pärast kasutamist visata ettenähtud jäätmekonteinerisse.

1. Kirjandusviide

https://www.gbo.com/fileadmin/media/GBO-International/02_Downloads_Preanalytics/SALES_Flyers/English/980967_MiniCollect_Lancelino_Flyer_en_rev01_0321_web.pdf?_ga=2.29968630.876065940.1716204786-1504415235.1715839666