

Tähis	JÜL-6.1.4
Viide	JKL-228
Versioon	02

Kinnitas:	<i>elektrooniliselt</i>		Vanemlaborispetsialist	04.07.2024
Koostas:	<i>elektrooniliselt</i>	Pille Mee	Juhtiv bioanalüütik	04.07.2024
	Allkiri	Ees- ja perekonnanimi	Ametikoht	Kuupäev

MiniCollect® PIXIE Greiner Bio-One kannalantseti kasutusjuhend

1. Eesmärk

Juhendi eesmärk on tagada eesmärgipärane MiniCollect® PIXIE kannalantseti kasutamine kapillaarvere võtmisel vastsündinutel ja imikutel. Verevõtul järgi juhendit: Vastsündinutelt, imikutelt ja lastelt kapillaarvere võtmine [JKL-228](#).

2. Vastutus

Kapillaarvere võtmise protseduuri eest vastutavad bioanalüütikud/laborandid. Vastsündinute ainevahetuse uuringute kapillaarvere võtmise ning patsiendilähedaste uuringute teostamise eest vastutavad õed ja ämmaemandad.

3. Kehtivus

Protseduur kehtib SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinikutes ja meditsiinilistes teenistustes.





4. Protseduur



Enneaegsetel ja vastsündinud lastel kannast kapillaarvere võtmiseks kasuta kannalantsetti MiniCollect® PIXIE. Õige suurusega lantseti valimisel lähtu lapse kehakaalust vt tabel 1. Kannalantseti kasutusjuhend on ära toodud joonisel 1 ja ühendlaboris kasutusel olevad mikrokatsutid leiad tabelist 2.

Tabel 1. Kannast verevõtmise tingimused

Toote ref. number ja nimetus	Lõike pikkus	Torkesügavus	Lapse kaal
450526 MiniCollect® PIXIE 	1.75 mm	0.85 mm	<3 kg
450527 MiniCollect® PIXIE 	2.50 mm	1 mm	> 3 kg

Tabel 2. Mikrokatsutid

Toote nimetus ja ref. number	Toote nimetus ja ref. number
Microvette® APT 250 EDTA K2E 20.1331.100 	Microvette® APT 500 EDTA K2E 20.1330.100 
MiniCollect® TUBE 0.25 ml FX Sodium Fluoride / 	Microvette® 200 Fluoride/hep arin FH 20.1289 

Potassium Oxalate 450540			
MiniCollect® TUBE 0.5/0.8 ml CAT Serum Sep Clot Activator 450533		Microvette® 200 Serum Gel CAT 20.1291	

Joonis 1



1

Vajadusel soojenda lapse kanda ja seejärel teosta antiseptika.



2

Lukustusmehhanismi avamiseks vajuta ohutusklips alla.



3

Aseta lantsett punktsioonikohale ja punktsiooniks vajuta päästikut.



4

Pühi esimene veretlik ära ja õrnalt survet avaldades kogu proovimaterjal.

Lantsetid on ühekordsed, pärast kasutamist visata ettenähtud jäätmekonteinerisse.

5. Kirjandusviide

https://www.gbo.com/fileadmin/media/GBO-International/02_Downloads_Preanalytics/SALES_Flyers/English/981188_MiniCollect_PIXIE_Flyer_en_rev00_0321_web.pdf?_ga=2.254258446.740697686.1715839667-1504415235.1715839666