
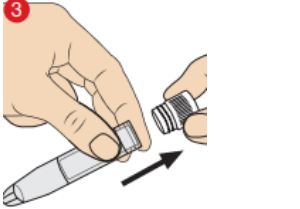
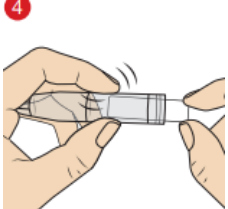
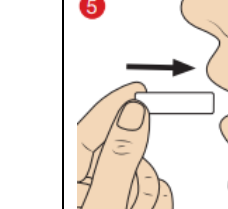
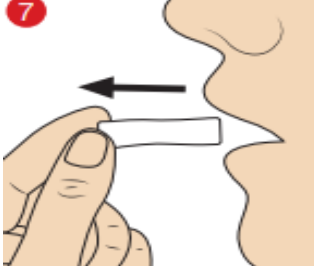
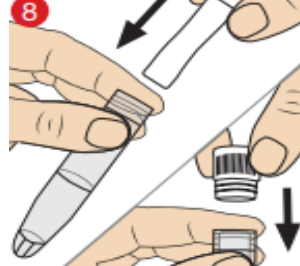


Süljeproovi kogumine Salivette süljekatsutiga (Salivette®)

Kasuta süljeproovi kogumiseks **süljekatsutit**

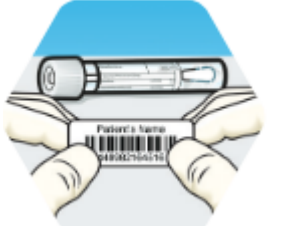

Markeeri proovinõu patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/vötkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood ja vajadusel täida tellimisleht patsiendi andmete ja proovivõtu kuupäeva- ja kellaajaga).

 1 ≥ 30 min	 2	Süljeprooviks ettevalmistus: 1. vähemalt 30 minutit enne süljeproovi kogumist ei tohi süüa ega juua (v.a vesi), pesta hambaid, kasutada suuvett, suitsetada; 2. teosta kätepesu;
 3	 4	 5 3. ava Salivette süljekatsuti; 4. eemalda katsutis olev vatitampoon; 5. aseta vatitampoon suhu;
2 min without chewing	 7	6. liiguta keelega vatitampooni suus 2—3 minutit, kuni see on süljest läbi imunud (ära näri); 7. eemalda tampoon suust;
 8		8. aseta süljest läbi imunud tampoon tagasi katsutisse (tampoon jääb katsuti ülemisse osasse, katsuti alumine osa jääb tühjaks) Sulge proovinõu lekkekindlat korgiga. Info: Sarstedt AG & Co.KG www.sarstedt.com COBAS E, ELECSYS cortisol
	Kontrolli, kas proovinõu on korrektselt markeeritud patsiendi andmetega (eHL juhtumikood/ vötkood või ees- ja perekonnanimi, isikukood). Tellimuse vormistamisel eHL-s jälgi järgmisi aspekte. Materjal: registreeri õige materjal Proovinõu tüüp: süljekatsuti Sisendparameetrid: vajadusel Uuringumaterjal säilib toatemperatuuri 24 tundi või 2...8 °C juures kuni neli ööpäeva.	